

ACTOANID® WIPES


Alkoholfreie Tücher zur Schnelldesinfektion

Art.-Nr. 05.1210.100 05.1210.100L
05.1210.150 05.1210.150L


Inhaltsstoffe: In 100 g der Tränkflüssigkeit **Actoanid® Spray** sind enthalten: 0,23 g Polyhexamethylenbiguanid Hydrochlorid; 0,28 g quartäre Ammoniumverbindungen und Hilfsstoffe.

WICHTIG: Bitte vor Anwendung Sicherheitsdatenblatt und Produktinformationsblatt lesen und verstehen.
Actoanid® Wipes darf **nicht** benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist!
Folgende Arbeitsschritte **müssen** eingehalten werden, um jegliche Kontamination zu **vermeiden!**


ACTO GmbH
Büchnerstr. 11
38118 Braunschweig
info@actogmbh.com
+49 (0) 531 239 50 80
(Mo-Fr 9.00 - 16.30 Uhr) Ortstarif

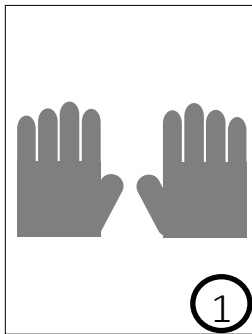


1
Vor Gebrauch Hände mit einem Händedesinfektionsmittel desinfizieren und Handschuhe anziehen.

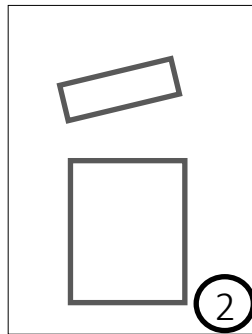


2
Beim erstmaligen Öffnen Deckel abnehmen.

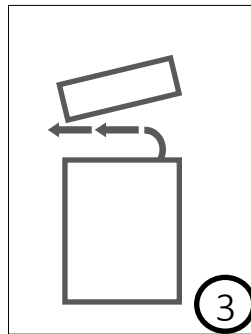


3
Verpackungsfolie entfernen.

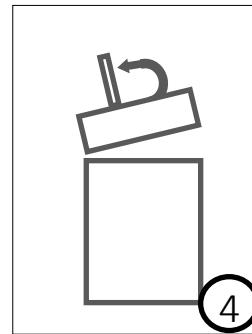


4
Klappdeckel öffnen.

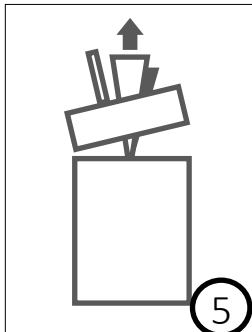


5
Das erste Tuch durch die Öffnung im Deckel stecken.

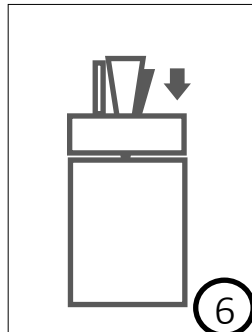

6
Verpackung festhalten und Deckel fest verschließen.

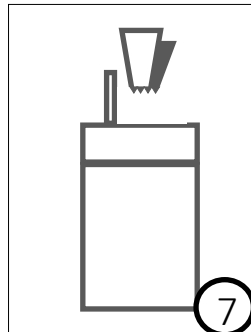

7
Verpackung mit einer Hand festhalten und das erste Tuch abreißen. Kontakt zum darauffolgenden Tuch vermeiden.

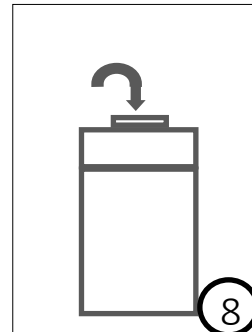

8
Klappdeckel wieder fest verschließen.

- 9 Das entnommene Tuch auf der Handfläche entfalten. Die empfohlene Anwendungstemperatur liegt zwischen 19°C und 21°C.
- 10 Die zu reinigenden Flächen / Instrumente vollständig mit **ACTOANID® WIPES** in einer Bewegung - von der sauberen zur kontaminierten Fläche hin - abwischen und anschließend **60 Sek.** einwirken lassen.
- 11 Vor der Benutzung der gereinigten Flächen / des gereinigten Gerätes warten bis der Flüssigkeitsfilm vollständig verdunstet und die Oberfläche trocken ist.
- 12 **ACTOANID® WIPES** und Handschuhe fachgerecht entsorgen!
- 13 Es wird empfohlen nach Gebrauch den Deckel des **ACTOANID® WIPES**-Spenders mit **ACTOANID® WIPES** zu desinfizieren. Bei Raumtemperatur lagern.

Diese Anweisung einschl. aller Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung der ACTO GmbH unzulässig und strafbar.